

# BREAST CARE GLOVE

## Caratteristiche del guanto BCG

Il guanto “**Breast Care Glove**” è un guanto che aumenta la sensibilità tattile migliorando la capacità discriminante delle dita e della mano durante l'esame di auto-palpazione.

Il guanto “**Breast Care Glove**” è fabbricato in Etil-Vinil-Acetano (EVA), composto che aderisce benissimo alla pelle. Sulla superficie interna del guanto, quella che poi risulterà a contatto con la pelle, un doppio strato di materiale aumenta la sensibilità tattile del palmo della mano. Il materiale di fabbricazione del guanto è senza polvere, privo di proteine o allergeni che possono lasciare residui o irritare la mano o la pelle. Il materiale inoltre è privo di diossina quindi può essere usato e smaltito senza problemi.

Il guanto “**Breast Care Glove**” è un dispositivo registrato (patent-pending, trademarked) in Giappone ed in altri paesi.

### COME SI ESEGUE IL TEST DI AUTO-PALPAZIONE CON IL GUANTO “BREAST CARE GLOVE”


#### 1. Eseguire il controllo visivo. Sistemarsi di fronte ad uno specchio.

Sollevare entrambe le braccia e controllare se si notino cambi di forma, dimensione o colore dei seni, delle areole e dei capezzoli.

Porre le mani sui fianchi e muovere le braccia avanti e indietro stirando e facendo spostare i seni controllando se vi siano cambi rispetto alla struttura normale dei tessuti.

#### 2. Controllo tattile, manuale.

Indossare il guanto “**Breast Care Glove**” e controllare tutta la ghiandola mammaria come indicato: con tre dita (indice, medio ed anulare) disegnare un cerchio sul seno, iniziando dall'ascella. Accertarsi che la struttura del seno sia la stessa, già controllata durante un precedente esame di auto-palpazione e che non vi siano noduli o aree più turgide o di diversa densità. Spremere delicatamente i seni ed i capezzoli verificando l'assenza di fuoriuscita di secrezioni.

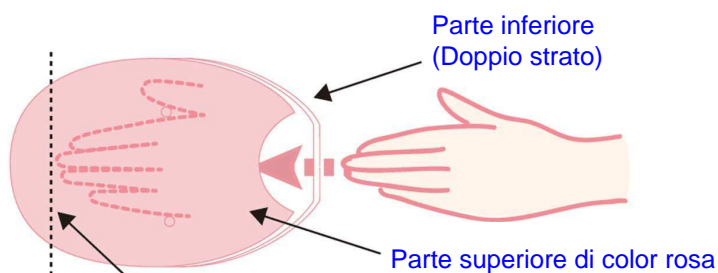

Non inserire la mano fino in fondo, al margine del guanto, per evitare la formazione di grinze durante la palpazione

## Come usare il guanto “Breast Care Glove”

Indossare il guanto “**Breast Care Glove**” in modo che lo strato rosa risulti sul dorso della mano e lo strato doppio inferiore a contatto con il palmo della mano. Fermare la mano prima della fine del guanto, dove mostra la linea

tratteggiata, **NON** inserire la mano completamente, fino al margine del guanto, per evitare il possibile corrugamento del guanto durante l'esame. Dopo aver inserito la mano all'interno del guanto sfregare delicatamente il palmo sull'altra mano in modo da far scivolare tra loro i due strati inferiori del guanto. A questo punto la preparazione del guanto per l'esame è stata completata.

Se la pelle risultasse umida (a causa della traspirazione) cospargere sulla pelle un po' di talco. Se dovessero formarsi grinze o arricciamenti sul guanto durante l'esame sollevare la mano dalla pelle e fare in modo di eliminare la grinza che interferirebbe con una efficace auto-palpazione.

Fabbricato da:

**ICST Corporation**

S-4 Tower 5-17-1, Kamiochiai, Chuo-Ku, Saitama city, Saitama,  
338-0001, Japan

**In Italia importato da:**

**∴ B.M. Sanitas Srl**

Via Caduti di Cefalonia, 90 - 50127 Firenze

Tel: 055 434421 Fax: 055 417621

Email: [commerciale@bmsanitas.it](mailto:commerciale@bmsanitas.it)

web: <https://www.bmsanitas.com>

