


Istruzioni per l'uso:

- Il Pain Patch non ha bisogno di essere posizionato direttamente sulla pelle.
- Può essere separato da indumenti sottili o stoffa. Il Pain Patch può essere tenuto in posizione utilizzando una varietà di opzioni come il nostro tessuto tipo VELCRO femmina (incluso nella confezione tramite spille da balia) oppure bende auto-aggrappanti, fasce, cerotti medicali, ecc. o semplicemente posizionandolo sopra l'area desiderata o appoggiandolo in posizione durante il riposo o il sonno.
- Iniziare il trattamento posizionando il cerotto direttamente sopra la zona dolorante, attendere qualche minuto poi spostarlo leggermente verso la testa (dal punto dolorante al cervello) attendere ancora un paio di minuti. Ripetere questo processo finché non si percepisce una diminuzione del dolore. Una volta trovata la posizione esatta che produce il massimo sollievo scegliere il metodo migliore per fissarlo in posizione.

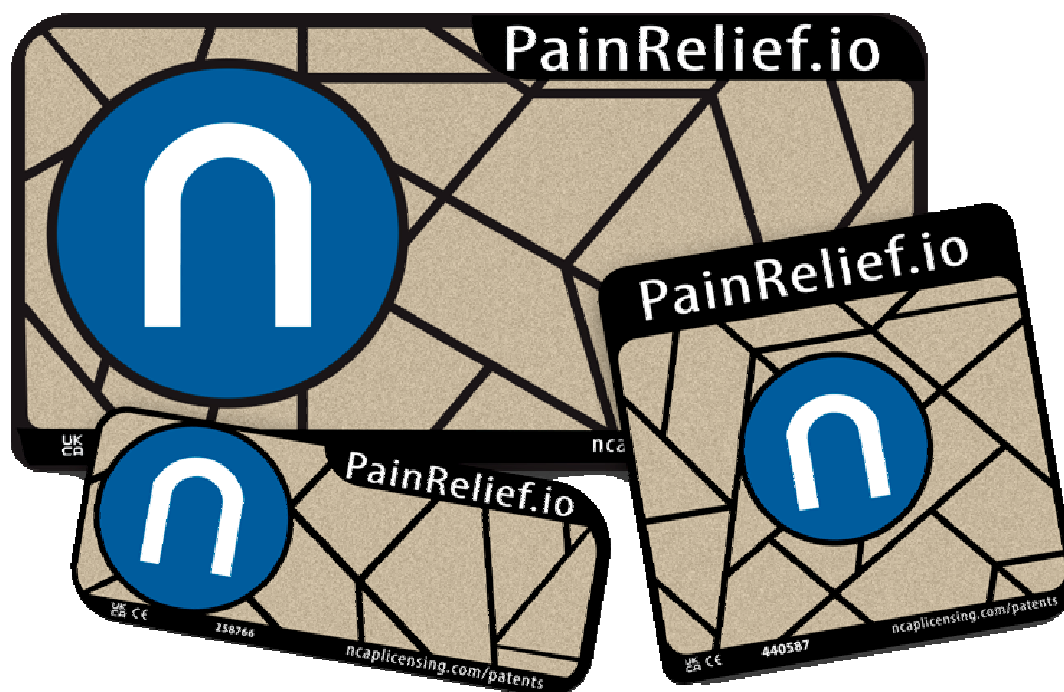

Painrelief Patch

Importato da:

B.M. Sanitas

Via Caduti di Cefalonia, 90 - 50127 Firenze
tel 055434421
fax 055417621

Email: commerciale@bmsanitas.it

**Dispositivo Medico – Iscritto
al Repertorio Dispositivi Medici
del Ministero della Salute – I**

**CND V9099
RDM 2357607**